

# 仔豬處理省工工作車台 (另售) 集合各功能 一台擁有

- ◆ 想要 同時注射 和 灌餵各種液劑?
  - ◆ 想要 剪尾?
  - ◆ 想要 去勢?
- 想要有這些功能需身上帶多種工具?  
不用! 您只需要一台仔豬處理省工工作車



## 配備

- 1 仔豬處理省工工作車台 \* 1
- 2 注射器支架 \* 1
- 3 免手持自動餵食器 \* 1
- 4 藥袋 \* 1 5 保定架 \* 1 6 仔豬籃 \* 1
- 7 進口電熱剪尾器 \* 1
- 8 第二代無針注射器(免手持型) \* 1
- 高壓汽缸 \* 1



無針 避免  
交叉感染

# AcuShot 第二代無針注射器

加拿大進口

Acushot Mobile



## 疫苗 注射成效統計

App 下載  
AcuShot Needle Free

手機連藍牙 App 紀錄日程  
供資料下載 Email 便利寄檔

- 注射日期/時間
- 注射總次數
- 氣缸選用種類
- 注射劑量
- 注射順序並追蹤注射狀態
- 異常狀態顯示



# 無針注射器

## 建構牧場生物安全防線

經濟動物大量疫苗注射，避免交叉感染，為非洲豬瘟、豬流行性下痢、藍耳病等之必備解決方案。可注射各類型動物及不同年齡，包括豬、牛、羊。

## 動力

AcuShot 第二代無針注射器的動力缸，為電動機構壓縮並鎖定在觸發位置，按壓開關後便可發射。馬達由最新的鋰聚合物可充電電池驅動，即使電池快沒電時，注射品質也不會受到任何影響。

電池沒電後，只需更換另一顆電池，即可開始使用。

由充電電池供電，每個電池可注射約 400~1,000 頭 (依據劑量及高壓氣缸種類略有增減)。

## 規格 (本系統包含)

- 適用於皮內、皮下、肌肉之注射；以及各類劑型，包含水性、油性，劑量設定範圍 0.2~2.5ml。
- 給藥可直接使用疫苗瓶，也可以使用藥袋或針筒。
- 所有注射記錄與注射參數皆儲存於主機內，可用手機藍牙連結下載。
- 主機重量 3.5kg (含電池與高壓氣缸)；另售手持注射槍重量 430g。

免手持型

※ 主機+藥瓶重量 - 仔豬工作車負擔 產編: ACTA009

移動型

※ 主機+藥瓶重量 - 肩部/腰部負擔 產編: ACTA008

### 手持注射槍 (另售) 產編: ACTA010

※ 附註: 移動型主機，可加購噴頭與主機固定座等，即改成免手持型在工作台上操作。

# POWER CYLINDER 高壓汽缸 選擇表

五種不同壓力

豬齡/劑量/機型	皮內注射	皮下注射	肌內注射	使用次數	顏色區分	壓力區分	
<b>新生</b> 免手持型 1-7 日齡 1.3 - 2.25 (kg)	粉紅	粉紅 (a)	粉紅或綠	約 5 萬次	粉紅 P1	小	
<b>仔豬</b> 移動型 1-3 週齡 3.2 (kg)	綠	綠或藍 (a)	綠或藍	約 5 萬次	綠 G2	根據動物大小，選用不同壓力	
<b>保育豬</b> 移動型 3-10 週齡 4.5 - 27 (kg)	藍	藍 (a)	藍或紅	約 5 萬次	藍 B3		
<b>肥育豬</b> 移動型 10 週齡+ 27 - 120 (kg)	藍或紅	紅 (a)	紅或黃	約 2 萬次	紅 R4		
<b>女豬/母豬</b> 移動型 25 週齡+ 125 - 225 (kg) 約 1-2.5 cc (b)	紅	紅或黃 (a)	紅或黃 (a)	約 2 萬次	黃 Y5		大
(a) 皮下注射時，必須考慮注射部位的選擇，技術和劑量，通常與傳統有針做法類似的注射位置效果很好。 (b) 注射母豬時，若有使用油劑，建議使用黃色。							
※若在施打時出現流血現象，建議更換壓力較小的汽缸。 ※高壓汽缸使用壽命與使用方式有關，空射(Dry Shot)可能會大幅減少高壓汽缸壽命。							

	皮內	皮下	肌內	皮內	皮下	肌內
<b>小牛 (6月齡以下)</b> <b>女牛 (應考慮毛髮密度)</b> <b>成牛 (應考慮毛髮密度)</b>	藍/紅	藍/紅	紅	藍/紅	藍	藍/紅
<b>小羊 (2周齡)</b> <b>女羊 (6月齡)</b> <b>成羊 (6月齡以上)</b>	綠	綠	綠	藍/紅	紅	紅/黃